

قم دائماً بتخزين الجهاز في التلاجة مع وضع الفطاء الأبيض .

لا تقم بتخزين الجهاز بإبرة متصلة.

يمكن تخزين الجهاز في التلاجة بعد استخدامه لأول مرة لمدة ٢٨ يوماً. تخلص من الجهاز بعد ٢٨ يوماً من الاستخدام.

معلومات مهمة

لا تبدأ الاستخدام حتى تقرأ دليل الأدوية ودليل المستخدم الوارد في علبة بونتيو الخاصة بك. اتبع الإرشادات بعناية عند استخدام جهاز بونتيو .

لا تشارك جهاز بونتيو أو الإبر مع أي شخص آخر. يمكن أن تنتقل العدوى أو المرض من شخص لآخر.


لا تستخدم جهاز بونتيو لأكثر من ٢٨ يوماً. يحتوي جهاز بونتيو على ٢٨ جرعة من الدواء. بعد ٢٨ يوماً من الاستخدام ، تخلص من هذا الجهاز حتى لو لم يكن فارغاً تماماً.

لا تأخذ أكثر من جرعة واحدة من بونتيو في نفس اليوم.

لا تحاول نقل بونتيو من الجهاز المقدم للحقنة أو أي جهاز آخر.

الجهاز وقطع الفيار

* الإبر غير مدرجة. يوصى باستخدام إبر الفلم Dickinson and Becton Company من مقياس ٢٩ إلى ٣١ للاستخدام مع هذا الجهاز.

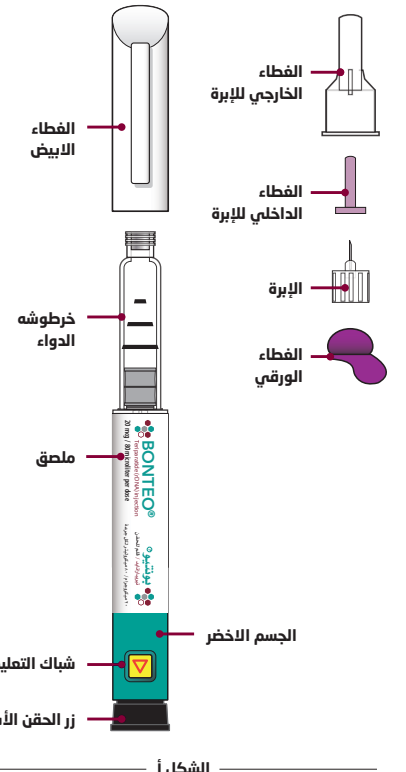


الشكل أ

١ تحضير موقع الحقن وإزالة الفطاء الأبيض

أ) اغسل يديك قبل الاستخدام

ب) تحضير موقع الحقن (الفخذ أو البطن) على النحو الموصى به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. ج) قم بإزالة الفطاء الأبيض عن طريق سحبه مباشرة من الجهاز (الشكل ب).

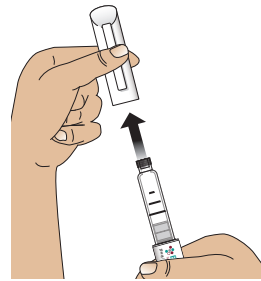


الشكل ب

٢ فحص الجهاز، أسم الجهاز والدواء

أ) تحقق من الجهاز:

لا تستخدم جهاز BONTÉO في حالة تلفه. ب) تحقق من المصلق الموجود على الجهاز لا تستخدم إذا كان الجهاز يحتوي على دواء غير صحيح أو إذا انتهت مدة صلاحية الدواء (الشكل ج). ج) تحقق من خرطوشة الدواء. يجب أن يكون الدواء السائل صافياً وعديم اللون. لا تستخدم الدواء إذا كان غائماً أو ملوئاً أو به جسيمات غائمة. (الشكل ج).

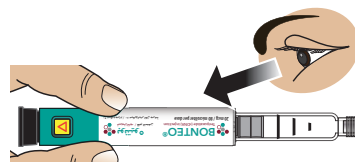

الشكل ج

٣ تركيب الأبرة


أ) انزع الفطاء الورقي (الشكل د).



الشكل د

ب) ادفع الإبرة مباشرة على خرطوشة الدواء. أدر الإبرة في اتجاه عقارب الساعة حتى تعلق بقوة (الشكل هـ والشكل و).



لا تبالغ في شد الإبرة

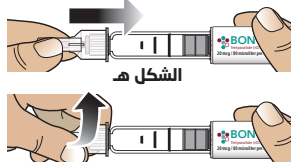

الشكل هـ والشكل و

٤ إزالة الفطاء الخارجي للإبرة

اسحب غطاء الإبرة الخارجي الكبير (الشكل ز)، واحفظه للاستخدام لاحقاً (انظر الخطوة ٩).

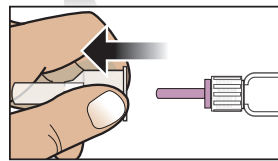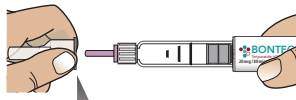


الشكل ز

٥ ضبط الجرعة

اسحب زر الحقن الأسود إلى أن يتوقف (الشكل ح).



الشكل ح

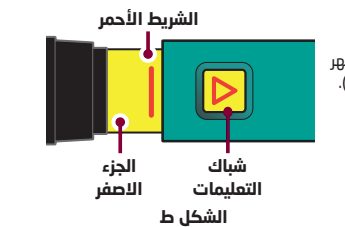

تحقق للتأكد من ان الشريط الأحمر ظاهر. بالإضافة إلى ذلك، شباك التعليمات سوف يظهر السهم مشيراً نحو نهاية إبرة الجهاز (الشكل ط).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم يتم ضبط الجهاز بالكامل أو إذا لم تتمكن من أرجاع زر الحقن الأسود يمكن الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلة هـ على الصفحة الخلفية.

حقن الحقنة

٧ حقن الجرعة

أ) امسك برفق طية من الجلد على فخذك أو بطنك وأدخل الإبرة مباشرة في الجلد المطوي (الشكل ك). ب) اضغط على زر الحقن الأسود لأسفل حتى يتوقف مع الاستمرار (الشكل ل).




الشكل ل




الشكل ك

ج) امسكها و عد حتى ٥ ببطء. يجب أن تنتظر حتى العدد ٥ للتأكد من أخذ الجرعة الكاملة (الشكل م). د) أخرج الإبرة من الجلد (الشكل ن).

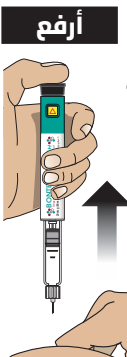

الشكل ن

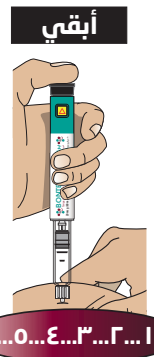


الشكل م

ملاحظة: قد لا ترى المكبس يتحرك. للتأكد من أخذ الجرعة ، انظر الخطوة ٨.

٨ تأكيد الجرعة

تحقق للتأكد من أن زر الحقن الأسود قد وصل للطاق. ستظهر النافذة سهماً يشير إلى الزر الأسود. إذا لم يظهر الجزء الأصفر، فقد انتهت من خطوات الحقن بالطريقة الصحيحة (الشكل س).

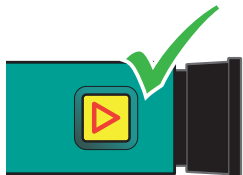

الشكل س


هام يجب أن لا ترى الجزء الأصفر. إذا كنت قد رأيت الجزء الأصفر ، فلا تحقن نفسك مرة ثانية في نفس اليوم. بدلاً من ذلك، يجب عليك إعادة تعيين الجهاز. ارجع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها المشكلة أ في الصفحة الخلفية لمزيد من المعلومات.

٩ إزالة الإبرة والتخلص منها

أ) أعد غطاء الإبرة الخارجي الكبير (الشكل ع و الشكل ف). لا تحاول وضع غطاء الإبرة مرة أخرى بيدك.



الشكل ع

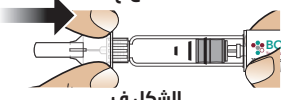

الشكل ف

ب) قم بفك الإبرة المفطاة من خلال إعطاء غطاء الإبرة الكبير ٣-٥ لفات عكس اتجاه عقارب الساعة (الشكل ص).




الشكل ص

أسحب الإبرة بشكل أفقي (الشكل ق).



الشكل ق

ج) تخلص من الإبرة في وعاء مقاوم للثقوب وفقاً للوائح المحلية (الشكل ر).

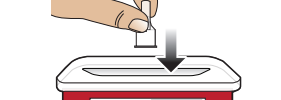

الشكل ر

معلومات التخلص من الحقنة

لمزيد من المعلومات حول كيفية التخلص من الإبرة بشكل صحيح، راجع قسم معلومات التخلص على الصفحة الخلفية.

التنظيف والتخزين

تنظيف الجهاز الخاص بك

- امسح الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش مبللة.
- لا تضع الجهاز في الماء، أو تغسله أو تنظفه بأي سائل.

تخزين الجهاز

- بعد كل استخدام ، قم بوضع الجهاز في التلاجة على الفور. اقرأ وأتبع التعليمات الواردة في قسم دليل الأدوية "كيف يمكنني تخزين بونتيو؟".
- لا تقم بتخزين الجهاز بإبرة متصلة. القيام بذلك قد يتسبب في تكوين فقاعات الهواء في خرطوشة الدواء.
- يتم تخزين الجهاز مع الفطاء الأبيض.
- لا تجمد الجهاز. إذا تم تجميد الجهاز، فألق الجهاز واستخدم جهازاً جديداً

ملاحظات مهمة أخرى

- يحتوي الجهاز على ٢٨ يوماً من الدواء.
- لا تنتقل الدواء إلى حقنة. قد ينتج عن ذلك تناول جرعة خاطئة من الدواء.
- اقرأ وأتبع التعليمات في دليل المستخدم بحيث تستخدم جهازك بالطريقة الصحيحة.
- تحقق من مصلق الجهاز للتأكد من حصولك على الدواء المناسب وأنه لم ينته صلاحيته.
- لا تستخدم الجهاز إذا بدا تالفاً. انظر إلى الدواء في الخرطوشة. إذا كان الدواء غير صافياً، أو إذا كان يحتوي على جزيئات، فلا تستخدمه.
- استخدم إبرة جديدة لكل حقنة.
- أثناء الحقن، قد تسمع نقرة أو أكثر - وهذا أمر طبيعي.
- لا ينصح باستخدام الجهاز من قبل المكفوفين أو أولئك الذين يعانون من مشاكل في الرؤية دون مساعدة من شخص تم تدريبه على الاستخدام السليم للجهاز.
- حافظ على جهازك والإبر بعيداً عن متناول الأطفال.

التخلص من جهاز الحقن

تخلص من جهاز الحقن بونتيو بعد ٢٨ يوماً من الاستخدام الأول.

تاريخ اول استعمال : / /

ارميهِ بعيداً بعد : / /

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
<p>أ لا يزال الجزء الأصفر يظهر بعد الضغط على زر الحقن الأسود. كيف أقوم بإعادة ضبط الجهاز الخاص بي؟</p>	<p>إعادة ضبط الجهاز. اتبع الخطوات التالية:</p> <p>١) إذا كنت قد حقنت بالفعل، لا تحقن نفسك مرة ثانية في نفس اليوم.</p> <p>٢) قم بإزالة الإبرة والتخلص منها في حاوية الأدوات الحادة وفقاً للوائح المحلية.</p> <p>٣) ارفاق إبرة جديدة. انزع الفطاء الخارجي واحفظه</p> <p>٤) سحب غطاء الإبرة الداخلية والتخلص منه.</p> <p>٥) وجه الإبرة لأسفل في حاوية فارغة. اضغط على زر الحقن الأسود حتى يتوقف. امسكها وعد ببطء إلى خمسة. قد ترى دفق صغير من السائل. عندما تنتهي، يجب أن يكون زر الحقن الأسود قد ضغط إلى آخره.</p> <p>٦) قم بفك الإبرة والتخلص منها في حاوية الأدوات الحادة وفقاً للوائح المحلية. ضع الفطاء الأبيض مرة أخرى، ثم ضع الجهاز في التلاجة.</p>
<p>ب كيف يمكنني معرفة ما إذا كان الجهاز الخاص بي يعمل؟</p>	<p>يجب أن تضغط على زر الحقن لآخره للتأكد من وصول الجرعة كاملة استخدم إبرة جديدة للحقن في كل مرة</p>
<p>ج أرى فقاعة هواء في القلم الخاص بي.</p>	<p>لن تؤثر فقاعة الهواء الصغيرة على الجرعة ولن تؤدي. يمكنك الاستمرار في تناول الجرعة كالمعتاد.</p>
<p>د لا أستطيع أخراج الإبرة.</p>	<p>١) ضع غطاء الإبرة الكبير على الإبرة.</p> <p>٢) استخدم غطاء الإبرة الكبير لفك الإبرة.</p> <p>٣) قم بفك الإبرة عن طريق لف غطاء الإبرة الكبير من ٣ إلى ٥ لفات في اتجاه عقارب الساعة.</p> <p>٤) إذا لم تستطع إزالة الإبرة، فاطلب من شخص ما مساعدتك.</p>
<p>هـ ماذا أفعل إذا واجهت صعوبة في سحب زر الحقن الأسود؟</p>	<p>قم بالتفكير إلى جهاز جديد لتتناول الجرعة وفقاً لتعليمات مقدم الرعاية الصحية. عندما يصعب سحب زر الحقن الأسود ، فهذا يعني أنه لا يوجد ما يكفي من الدواء في الجهاز الخاص بك لجرعة أخرى.</p>

معلومات الأتلاف

- استخدام الحاوية التي هي:
- مصنوعة من البلاستيك الثقيلة
- يمكن إغلاقها بغطاء مشدود ومقاوم للثقوب. دون أن تتمكن الأدوات الحادة من الخروج
- مستقرة أثناء الاستخدام
- مقاومة للتسرب
- تم وضع العلامات المناسبة عليها لتحذير النفايات الخطرة داخل الحاوية